



Your Endo Specialist™

One Shape®

El instrumento único en rotación continua

The One and Only...



Sanavis Group

Introducción



Your Endo Specialist™

Un solo instrumento en rotación continua para sus tratamientos endodónticos

La simplificación de sus actos endodónticos con total seguridad y eficacia es una de nuestras mayores preocupaciones

MICRO-MEGA® les propone hoy One Shape®, un solo y único instrumento en rotación continua para obtener preparaciones canalares de calidad.



Sanavis Group

Introducción



Your Endo Specialist™

Un solo instrumento en rotación continua para sus tratamientos endodónticos

One Shape[®], instrumento de níquel-titanioinstrument, permite una negociación segura de las curvaturas más severas con una dinámica instrumental muy sencilla

Su punta inactiva asegura una progresión eficaz evitando los bloqueos intempestivos, a menudo precursores de la fractura del instrumento.

One Shape[®] un nuevo triunfo de la sencillez y la seguridad....



Sanavis Group

Instrumento unico en rotación continua



Your Endo Specialist™

Uno solo...



→ Conformación canalar de calidad gracias al inédito diseño de éste instrumento.

→ Rapidez de tratamiento : un tratamiento canalar cerca de 4 veces más rápido que con un tratamiento convencional.



Sanavis Group

Instrumento unico en rotación continua



Your Endo Specialist™

Uno solo...

• 1 solo instrumento

- Duración global del tratamiento mejorada*.
- Simplificación de la gestión de sus secuencias instrumentales.

* Es imperativo dejar actuar el irrigante durante 15 minutos como mínimo para obtener una óptima desinfección del conducto.



Sanavis Group


Instrumento unico en rotación continua

Unico...



Your Endo Specialist™

• En rotación continua

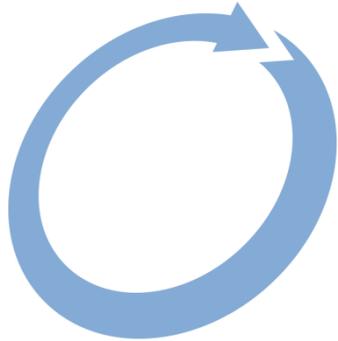

→ No es preciso adquirir un nuevo motor de endodoncia específico.

Usted puede continuar usando su motor de endodoncia habitual o su contrángulo de endodoncia, ambos de rotación continua.



Sanavis Group


Instrumento unico en rotación continua

Unico...



Your Endo Specialist™

• En rotación continua

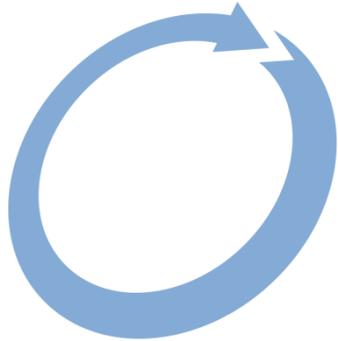

→ Un principio de economía: usted usa el material que ya tiene en su clínica y solo debe comprar la lima One Shape®.



Sanavis Group


Instrumento unico en rotación continua

Unico.....



Your Endo Specialist™

• En rotación continua

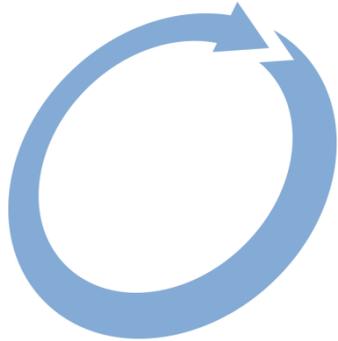

→ La rotación continua es un principio conocido y reconocido que se viene usando con éxito desde hace más de 20 años: **un comportamiento dinámico e instrumental que usted ya conoce.**



Sanavis Group

Instrumento unico en rotación continua

Para su seguridad...

•Estéril

- Blister divisible.
- Ganancia de tiempo: One Shape® está lista para su uso en boca.
- Económico: ninguna esterilización previa antes de su utilización.



Your Endo Specialist™



Sanavis Group

Instrumento unico en rotación continua

Para su seguridad y la de su equipo...



Your Endo Specialist™

•Estéril

→ Facilidad de trabajo para su asistente.

→ Control del riesgo de infección: seguridad para el paciente y para el personal sanitario.

→ Respeto a la cadena de desinfección.



Sanavis Group

Instrumento unico en rotación continua



Your Endo Specialist™

...y también para la seguridad de sus pacientes!

• Uso unico

- Eliminación de riesgos de fractura por acumulación de fatiga en la lima.
- Simplificación de la gestión de las secuencias instrumentales.
- Le aconsejamos usar la lima One Shape® para un solo tratamiento*.

* Desechar todo instrumento que presente signos de desgaste o fatiga aunque no haya terminado el tratamiento completo.



Sanavis Group




Instrumento unico en rotación continua



Your Endo Specialist™

Instrumento con sección variable

- Un diseño original e innovador.
- Innovación MICRO-MEGA® : el instrumento presenta una sección distinta a lo largo de la lima.
- Principio One Shape® : 3 zonas con secciones distintas.

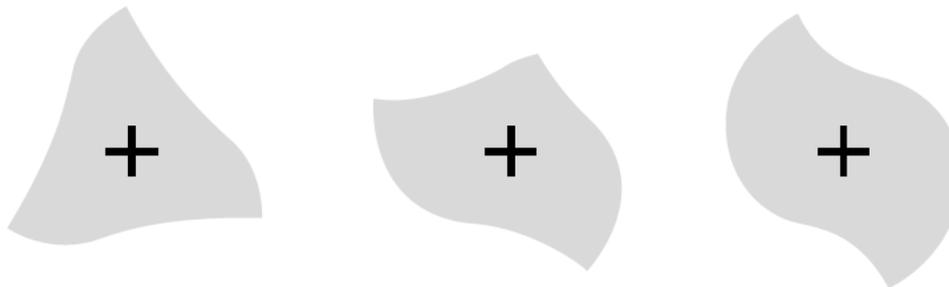

Sanavis Group

Instrumento unico en rotación continua



Your Endo Specialist™

Ventajas de la sección variable:

- Su flexibilidad y el efecto guía que proporcionan los tres ángulos de corte en su porción apical nos aseguran un perfecto respecto a la anatomía y curvatura original del conducto .
- La variación de su sección proporciona una acción de corte óptimo en tres áreas del canal.



Sanavis Group


Instrumento unico en rotación continua



Your Endo Specialist™

Ventajas de la sección variable:

- El paso variable de cada sección limita el atornillado
- ABC (Anti Breakage Control) con la mayor seguridad: el instrumento se desenrolla para prevenir la fractura.

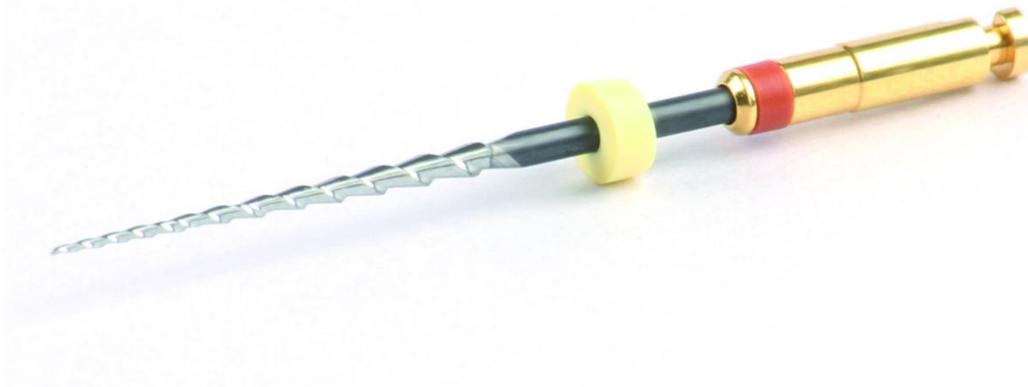

Sanavis Group

Instrumento unico en rotación continua



Your Endo Specialist™

Consejos y recomendaciones

Penetración inicial:

Una vez abierta la cavidad de acceso con los orificios canalares libres, se realiza el cateterismo con instrumentos manuales de acer de diámetro pequeño y precurbados (limas MMC 10-15)

Éstos proporcionan información sobre la anatomía del conducto que complementan la obtenida mediante radiografías preoperatorias.

El último instrumento manual nos permite a la vez determinar la longitud de trabajo.



Sanavis Group

Instrumento unico en rotación continua



Your Endo Specialist™

Consejos y recomendaciones

Penetración inicial:

- Si el cateterismo hasta el 15 con una lima K es imposible, aconsejamos utilizar las G-Files™ (G1+G2) a la longitud de trabajo estimada.

Seguidamente determinar la longitud de trabajo con una lima K del 15.

- La eliminación de las interferencias de los orificios coronales correrá a cargo de ENDOFLARE®.



Sanavis Group

Instrumento unico en rotación continua



Your Endo Specialist™

Consejos y recomendaciones

Una dinámica instrumental simple y eficaz :

- Realizar un movimiento de vaivén hasta la longitud de trabajo. Cuando el instrumento encuentra alguna resistencia,(le dégager légèrement). Si no se consigue penetrar más, sáquelo del conducto y límpielo.
- Realizar un movimiento de apoyo parietal remontando si es necesario.

Lime K
(MMC)
N°10



Lime K
(MMC)
N°15



One Shape®



Vitesse de rotation : 400 tr/min

LT : longueur de travail



Sanavis Group

Instrumento unico en rotación continua



Your Endo Specialist™

Consejos y recomendaciones

Una dinámica instrumental simple y eficaz:

- Verificar la permeabilidad apical.
- Irrigar abundantemente con hipoclorito de sodio.
- Usar M-EDTA Cream (EDTA en crema).


Lime K
(MMC)
N°10



Lime K
(MMC)
N°15



One Shape®

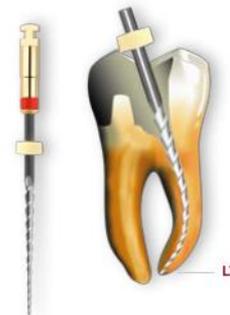

Vitesse de rotation : 400 tr/min

LT : longueur de travail



Sanavis Group

Instrumento único



Your Endo Specialist™

Único !

- 1 solo instrumento
- 1 solo uso

1

One Shape, the One and Only



Sanavis Group